



Mutation des technologies, évolution des réglementations, hausse de la productivité... Face à ces enjeux, le Laboratoire Synlab Vallée du Rhône a opté depuis longtemps pour la S-Monovette® de Sarstedt. Détails et explications sur un dispositif qui simplifie le prélèvement avec Valérie Verneau, biologiste médicale au Laboratoire de Roussillon, plateau technique de Synlab VDR.

PRÉLÈVEMENT SANGUIN

S-Monovette® , un système unique conjuguant sous vide et aspiration

Sur quels critères votre laboratoire a-t-il choisi Sarstedt ?

Il y a environ 20 ans que nous utilisons les produits Sarstedt. Nous avons immédiatement été convaincus. Aujourd'hui, aucune de mes préleveuses ne reviendrait en arrière. Le système est très simple d'utilisation et il garantit une hygiène parfaite. L'aiguille, protégée en fin de prélèvement, ne fait qu'un avec l'adaptateur. Cela limite les gestes superflus ainsi que les risques d'AES (accident d'exposition au sang).

La S-Monovette® a la particularité de proposer un système hybride sous vide et par aspiration...

Grâce à cette solution deux-en-un, nous adaptons facilement, y compris aux veines difficiles telles que celles des patients sous chimiothérapie. Pour ma part, je prélève le premier tube

par aspiration puis les suivants sous vide, si la veine le permet. Sinon, je reste en système par aspiration. Mais il est également possible de prélever tous les tubes sous vide.

Vos équipes y trouvent-elles d'autres bénéfices ?

Oui et les patients aussi, qui témoignent du confort de ce dispositif. Le changement de tube se fait en douceur. Il se loge aisément et sans forcer dans l'adaptateur et l'aiguille ne bouge donc pas dans la veine. Autre avantage : la réduction du volume des déchets, la S-Monovette® n'ayant pas de tulipe. Nous apprécions aussi beaucoup l'existence d'un modèle court d'épicrânienne car il n'y a plus besoin de tube de purge. En pédiatrie comme en gériatrie, c'est un vrai apport.

Et en termes d'adaptabilité à vos automates ?

Certains préleveurs externes utilisent le sous vide traditionnel ; nos automates sont donc polyvalents. Un problème peut se poser pour les tubes à perforer. Il suffit dans ce cas d'en avertir le fournisseur au moment de l'acquisition d'un nouvel automate afin qu'il effectue les réglages nécessaires.

Utilisez-vous d'autres produits Sarstedt ?

Nous venons de passer de la monovette urinaire à la V-Monovette®, un tube

SYNLAB VDR - VALLÉE DU RHÔNE

La société, accréditée à 100 %, regroupe six laboratoires répartis sur un vaste territoire : l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Elle collabore avec de nombreux établissements hospitaliers, cliniques et maisons de retraite. Son plateau technique polyvalent situé à Roussillon traite environ 1 000 dossiers par jour.

boraté percutable destiné à l'ECBU (examen cytot bactériologique des urines). Ce flacon stérile présente deux avantages : la « cape de stérilité » atteste de sa bonne étanchéité et l'insertion profonde de l'aiguille dans le bouchon prévient les risques de blessure à la percussion des tubes.

Que pensez-vous de l'accompagnement offert par Sarstedt ?

Les équipes de Sarstedt sont très réactives en cas de besoin mais, comme nous sommes rodés, nous les sollicitons peu. Je les recommande sans hésitation, les tarifs de Sarstedt étant en plus désormais comparables à ceux des consommables conventionnels.



 **SARSTEDT**

03 84 31 95 95

info.fr@sarstedt.com

www.sarstedt.com